



*BEAUTY RESEARCHERS*

**PLATINUM**  
UV+COLLAGEN

CONSIGLI DI UTILIZZO

## Consigli di utilizzo per macchinario Abbronzante e Collagene

### PLATINUM

Platinum è il nuovo dispositivo prodotto da Smart Technologies che adotta le più recenti tecnologie di abbronzatura e per la stimolazione del collagene mediante fotobiomodulazione.

Il suo computer a bordo macchina permette di effettuare diverse tipologie di sedute e trattamenti, a seconda del vostro cliente.

E' possibile infatti selezionare (e accendere) il dispositivo in modalità: UV, COLLAGENE e COLLAGENE+UV. Quest'ultimo sfrutta alcuni principi biologici che possono garantire al vostro cliente il miglior risultato possibile dal punto di vista qualitativo.

Analizziamo alcune modalità di funzionamento e di vendita della seduta:

#### SESSIONE ABBRONZANTE

##### **Aspetti Biologici:**

La sessione abbronzante si configura ne più ne meno come una classica sessione in una doccia solare bassa pressione.

Il cliente in questo caso potrà selezionare il fototipo dell'abbronzatura e basterà premere START. In questo caso, durante tutta la sessione, verranno utilizzati solo 40 tubi dei 56 presenti.

**TEMPI:** I tempi di esposizione sono compresi tra i 10 e i 14 minuti a seconda del fototipo (impostabile)

##### **Aspetti Economici:**

La sessione abbronzante con PLATINUM può essere venduta ad un prezzo pari a quello di docce bassa pressione di pari prestazioni. In generale il prezzo medio per seduta in Italia per questo tipo di trattamento varia dai 6 ai 10 euro, a seconda della zona e della concorrenza.

Il costo medio di una seduta in termini di energia elettrica non supera i 40 centesimi di euro.

## SESSIONE COLLAGENE

### **Aspetti biologici:**

La sessione Collagene sfrutta il meccanismo della fotobiomodulazione per scatenare una reazione all'interno della cellula che aumenta la produzione interna di Collagene, rimodulando la sua attività e liberando nuovo collagene all'interno del tessuto connettivo.

La fotobiomodulazione è un trattamento usato da anni in ambito medico in maniera complementare ad altri trattamenti e che oggi può essere usato anche in ambito estetico grazie al progredire della tecnologia, che lo ha reso più accessibile ed efficace.

La sessione Collagene ha effetti positivi sin dalla seconda-terza seduta e ha in generale un effetto tonificante e rassodante sul corpo, mentre evidenzia un effetto lifting sul volto del soggetto trattato.

Esistono diversi comportamenti che possono innalzare drasticamente la durata e l'efficacia del trattamento sul soggetto, come trattamenti complementari e diete particolari.

Per incrementare il risultato consigliamo:

**-Peeling pre-trattamento (es. consigliato: Acido Glicolico)** (per diminuire lo spessore della pelle e consentire una migliore penetrazione della luce. **ATTENZIONE:** essendo la fotobiomodulazione un trattamento a base di luce di sconsiglia di usare peeling chimici (escluso il già testato Acido Glicolico che potrebbero generare reazioni fotosensibili nel soggetto. Se avete a disposizione solo peeling chimici assicuratevi che non creino reazioni di fotosensibilizzazione.)

**-Aumento tenore di acido ascorbico nella dieta.**

### **La Fotobiomodulazione**

La fotobiomodulazione consiste nell'irradiare le cellule con particolari frequenze di luce che hanno effetti dimostrati sull'attività delle stesse.

Nel caso dei macchinari Young e Platinum viene usata una onda elettromagnetica con elevata energia in corrispondenza delle lunghezze d'onda intorno a 633 nm. L'energia irradiata dalla macchina ha un effetto biologico sulle cellule del derma e in particolare sui fibroblasti, le cellule che normalmente hanno come principale funzione la sintesi del Collagene.

Quando si effettua un trattamento di fotobiomodulazione si lavora sulle cellule fibroblasti, aumentando la loro naturale attività.

Questo porta ad un incremento di Collagene nella pelle.

L'effetto finale del macchinario dunque è un miglioramento dell'aspetto della pelle simile a quello ottenuto dalle iniezioni di Collagene. La pelle appare alla fine del trattamento più elastica ma anche più luminosa e compatta.

Gli effetti documentati della fotobiomodulazione sono i seguenti:

- Aumento della quantità di Collagene nella pelle con effetto lifting e miglioramento della texture.
- Schiarimento delle macchie cutanee e del colore generale della pelle.
- Miglioramento della rimarginazione di ferite recenti.
- Miglioramento e attenuazione di cicatrici non recenti.

La fotobiomodulazione è usata con successo su soggetti di tutti i fototipi (anche persone di carnagione scura).

L'efficacia della fotobiomodulazione è subordinata ad alcuni parametri individuali riconducibili ai seguenti fattori:

- Spessore dello strato corneo superficiale (la pelle più sottile consente un miglior passaggio dei fotoni).

- Colore della pelle

- Dieta individuale (essendo la fotobiomodulazione una stimolazione del Collagene da parte dell'organismo è necessario che il corpo sia in grado di sintetizzarne in quantità. A questo proposito è necessario che il cliente che effettua le sedute assuma buone quantità di Acido ascorbico (Vitamina C). L'acido ascorbico è la molecola fondamentale da cui il corpo sintetizza il Collagene. Se l'utilizzatore non assume sufficiente vitamina C il corpo non sarà in grado di sintetizzare ulteriore Collagene).

Un aumento dell'acido ascorbico (vitamina C) tramite l'assunzione di integratori o di agrumi (noti per la loro ricchezza di acido ascorbico) aiutano notevolmente l'azione di fotobiomodulazione della Platinum.

**TEMPI:** I tempi di esposizione consigliati sono fra i 16 e i 20 minuti.

#### **Aspetti Economici:**

La **sessione al Collagene** corpo è un trattamento che in Italia non ha larga diffusione e quindi si configura una condizione di **scarsa concorrenza**.

E' altresì vero che esiste anche **poca conoscenza del trattamento** e del suo risultato da parte dell'utenza.

Il nostro suggerimento quindi è quello di fare un prezzo che vi permetta di mantenere un buon margine e **trattarlo come un trattamento estetico con un prezzo compreso tra i 12 e 18 euro**.

All'inizio però, con lo scopo di far conoscere il trattamento e fidelizzare il cliente, non abbiate paura a fare **campagne promozionali aggressive** con prezzi scontati, in modo da **far conoscere il prodotto**.

Ricordate che il costo di corrente della seduta non supera i 40 centesimi nemmeno per la fotobiomodulazione, quindi avete **ampi spazi di manovra per le vostre campagne promozionali**.

## SESSIONE COLLAGENE+UV

### Aspetti biologici:

Questa modalità è la vera innovazione di Platinum ed è un trattamento con risultati nuovi e altamente positivi.

Platinum utilizza la **tecnologia della fotobiomodulazione** in un modo nuovo, ovvero in combinazione con i raggi uv. All'interno di Platinum il cliente effettuerà un vero e proprio **trattamento COMBO COLLAGENE+ABBRONZATURA**.

La sessione è suddivisa in due fasi:

**FASE ATTIVATRICE:** attraverso la luce a 633 nm riattiva i fibroblasti, ovvero le cellule che producono il Collagene nel tessuto connettivo. Durante questa prima fase la pelle viene **preparata, distesa, protetta e resa più recettiva** verso i raggi uv.



**FASE ABBRONZANTE:** la macchina disattiva la luce Collagene a 633 nm e compie uno **SWITCH** alla **tecnologia UV SAFE**. I **raggi abbronzanti** altamente filtrati, trovano una **pelle morbida** e reattiva che si **abbronza rapidamente**.

Il risultato è una **abbronzatura IDRATATA** che **MANTIENE GIOVANE la pelle, attivando** solo i numerosi **EFFETTI BENEFICI DELLA ABBRONZATURA**.

Con il trattamento COMBO, potrete raggiungere due risultati: dare una migliore abbronzatura e servizio al vostro cliente (fattore essenziale nella attività) e prevenire la disgregazione delle fibre collagene che si avrebbe con una normale esposizione al Sole.

Il trattamento Collagene+UV può essere effettuato sia su **persone giovani che su persone anziane**, in quanto è un **trattamento a 360°** che dona una **abbronzatura più intensa e rispetta la pelle** dei soggetti che vogliono preservare un ottimo aspetto della pelle.

**TEMPI:** I tempi suggeriti possono variare da fototipo a fototipo. Il range di applicazione è dai 16 ai 20 minuti totali, calibrando le due esposizioni a seconda dell'età del soggetto.

Una disposizione DI MASSIMA è:

Soggetti giovani(20-50 anni): tempo collagene 40% + tempo UV 60% (es 8+12 minuti)



Soggetti non giovani (50 anni o oltre): tempo collagene 60% + tempo UV 40% (es. 12+8 minuti)

Per praticità usualmente si setta il tempo su 50%+50% (sessione collagene uguale ad abbronzante) e si usa il timer impostato dai 16 minuti totali per un fototipo chiaro (8+8 minuti) ai 20 minuti per un fototipo scuro (10+10 minuti)

### **Aspetti Economici:**

La sessione COMBO è una assoluta novità e non trova riscontro in nessun trattamento effettuato fino ad ora.

### CLIENTI SOLARIUM

Dati i risultati che il trattamento consente di ottenere ma il fatto che sia una novità, consigliamo di fare **promozioni orientate ai clienti "abbronzatura"**. Il vostro compito è di **proporre**, a chi entra e chiede per fare trattamenti abbronzanti, la **nuova seduta "aumentata"** con la sinergia al collagene, facendo pagare un **piccolo sovrapprezzo**.

Può essere utile dunque far pagare il 50% di supplemento sul prezzo normale che applicate per il solarium, così da **incrementare il vostro margine** e **invogliare il cliente** a provare il nuovo trattamento che ha il piccolo handicap di durare qualche minuto in più.

A seconda della vostra zona e della resistenza che la vostra clientela ha al cambiamento proponete sempre la sessione combinata ad un prezzo per il quale almeno più della metà della vostra clientela sia invogliata a fare il trattamento COMBO.

Consigliamo inoltre di dare la **possibilità di convertire sedute solarium con le nuove Combo**, in cambio di un **piccolo sovrapprezzo** (es. abbonamento prepagato da 100 euro per il solarium, basta aggiungere 40 euro per **trasformarle tutte in NUOVE SESSIONI COMBO**).

### CLIENTI NON SOLARIUM E NUOVI CLIENTI

Platinum con le sedute combinate vi dà la possibilità di **vendere il trattamento anche a chi normalmente non fa il solarium o non è vostro cliente**.

Indirizzate i vostri sforzi a **far capire alla clientela che normalmente non fa solarium**, come questa macchina proponga un **avanzamento tecnologico** tale che consente di **limitare altamente tutti i motivi per cui usualmente loro non fanno il solarium** (paura di rovinarsi la pelle, timore di bruciarsi ecc.) e portarli così a diventare anche loro utilizzatori abituali di Platinum.

Il presente documento è stato redatto a Marzo 2012 ed è di proprietà di Smart Technologies.

Per ulteriori informazioni sulla Platinum e sui trattamenti speciali, potete visitare il sito [www.platinum.solariumsmart.it](http://www.platinum.solariumsmart.it) o contattarci all'indirizzo [sviluppo@solariumsmart.it](mailto:sviluppo@solariumsmart.it).